



19.11.2024

Informationsschreiben**Zusatzinformation – potenzielle technische Fehlfunktion am Airbufo Inhalator**

Sehr geehrte Damen und Herrn,

Aufgrund des Einsatzes einer fehlerhaften Komponente bei Montage des Trockenpulverinhalators (Chargen NX6077, NT4997, NW1658, NT6775, NT6780) kann in sehr seltenen Fällen (max. 0,19 %) bei der ersten Aktuierung eine Fehlfunktion auftreten.

Diese Beeinträchtigung macht sich wie folgt bemerkbar:

Bei Betätigung des Hebels bis zum Anschlag ist **kein Widerstand spürbar** und es ist **kein klickendes Geräusch zu hören**. Es gelangt **keine** neue Dosis in Position, die **Anzeige der verbleibenden Dosierungen verharrt** in der initialen Position bei "**60**".

Treten die oben genannten Beeinträchtigungen auf, ist der Inhalator **nicht** bereit zur Anwendung. Es kann **keine** Dosis abgegeben werden.

Bitte wenden sie sich umgehend an Ihren Apotheker und lassen Sie sich ein Ersatzgerät aushändigen.

Wird die Funktionstüchtigkeit bei der ersten Verwendung bestätigt, kann der Trockenpulverinhalator bedenkenlos vollständig genutzt werden.

Ausschnitt aus der gültigen Gebrauchsinformation

Kommentar

Anwendung des Inhalators

Halten Sie den Inhalator wie auf den folgenden Abbildungen gezeigt in Ihren Händen.

1. Öffnen

- **Öffnen** Sie die Schutzkappe durch Umklappen nach unten, um das Mundstück freizulegen.
- Überprüfen Sie das Fenster des Dosiszählers, um zu kontrollieren, wie viele Dosen noch zur Verfügung stehen.




2. Dosierung vorbereiten

- Klappen Sie das Randstück des weißen Hebels nach oben. Vergewissern Sie sich, dass das Seitenfach geschlossen ist.




Hinweis: Betätigen Sie den weißen Hebel nur dann, wenn Sie bereit sind, eine Dosis des Arzneimittels zu inhalieren. Bei unnötigem Betätigen des weißen Hebels werden Dosen verschwendet.

- **Öffnen:** Legen Sie den weißen Hebel vollständig bis zum Anschlag um, bis dieser mit einem klickenden Geräusch einrastet. Hierdurch gelangt eine neue Dosis mit der an der Oberseite ersichtlichen Nummerierung in Position.

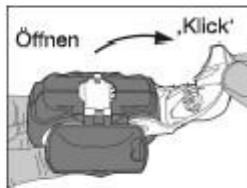

- **Schließen:** Bringen Sie den weißen Hebel wieder vollständig zurück, sodass er mit einem klickenden Geräusch in seine ursprüngliche Position einrastet. Der Inhalator ist nun für die sofortige Anwendung bereit.

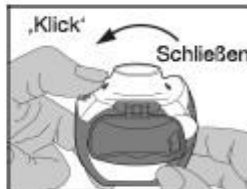

Bei Betätigung des Hebels bis zum Anschlag ist **kein Widerstand spürbar** und es ist **kein klickendes Geräusch zu hören**. Der Blisterstreifen wird nicht weiter transportiert, es gelangt **keine** neue Dosis in Position. Die **Anzeige der verbleibenden Dosierungen verharnt** in der initialen Position bei "**60**".

Der Inhalator ist **nicht** bereit für eine Anwendung.

Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken. Sollten Sie Rückfragen haben, erreichen Sie uns unter medwiss@hexal.com oder der Tel.-Nr. 08024 / 908-0.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hexal AG